

Nébulisateur BP 3190



babypharm



NOTICE D'UTILISATION

MISE À JOUR LE 27
NOVEMBRE 2022 PAR FG

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONTACTEZ NOUS :
HELLO@BABYPHARM.FR



BIENVENUE SUR VOTRE NÉBULISATEUR BP 3190

Nous prenons **la santé et la sécurité** des bébés très au sérieux. Tous nos produits répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Babypharm vous remercie d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez maintenant utiliser ce produit de nébulisation pour votre enfant ou pour un adulte. Ce guide de l'utilisateur vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre NÉBULISATEUR BP 3190.

Avant de pouvoir utiliser le NÉBULISATEUR BP 3190, nous vous recommandons de suivre pas à pas cette notice d'utilisation.

Veillez lire les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil.

Vérifiez que vous avez bien tous les éléments !

- **1 unité principale**
- **1 tasse à médicament**
- **1 notice d'utilisation**
- **1 masque adulte**
- **1 masque enfant**
- **1 pièce pour la bouche**



TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 4-5

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 6

ILLUSTRATION 7

MODE D'EMPLOI 8-12

NETTOYAGE 13-14

DÉPANNAGE 14-16

DÉFINITION DES SYMBOLES 17

SÉPCIFICATIONS 18-19

EMC 20

GARANTIE 21-22



babypharm



ATTENTION

UTILISEZ CET APPAREIL SOUS LA DIRECTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PROFESSIONNEL.- POUR LE TYPE, LA DOSE ET LE RÉGIME DU MÉDICAMENT. ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UN MÉDECIN. LES ENFANTS OU LES PATIENTS HANDICAPÉS DOIVENT ÊTRE ASSISTÉS PAR DES ADULTES OU DU PERSONNEL MÉDICAL LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

GARDEZ CET APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SOUS DES GAZ INFLAMMABLES. N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE POUR L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ, TEL QUE DÉCRIT DANS CE MANUEL, ET N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES JOINTES OU D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.

COUPEZ L'ALIMENTATION LORSQUE L'APPAREIL EST ANORMAL.

AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.CET ÉQUIPEMENT NE CONVIENT PAS AUX LIQUIDES EN SUSPENSION ÉLEVÉS OU AUX LIQUIDES VISQUEUX.CET ÉQUIPEMENT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT CHEZ DES PATIENTS CONSCIENTS.PENDANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL, SI VOUS OBSERVEZ UNE IRRÉGULARITÉ OU UNE GÊNE, ARRÊTEZ DE L'UTILISER ET CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ AU MAINTIEN DE LA VIE. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE FOURS À HAUTE FRÉQUENCE, DE FOURS À MICRO-ONDES ET DE TÉLÉPHONES PORTABLES.AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, OU SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, VEUILLEZ PROCÉDER À LA PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION DÉCRITE DANS LE MANUEL D'UTILISATION.



PRÉCAUTIONS:

• UTILISEZ ET STOCKEZ L'APPAREIL UNIQUEMENT DANS LES ENVIRONNEMENTS DE FONCTIONNEMENT ET DE STOCKAGE SPÉCIFIÉS DANS CE MANUEL. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI LE GOBELET À MÉDICAMENTS NE CONTIENT AUCUN MÉDICAMENT.

DIFFÉRENTS PATIENTS DOIVENT UTILISER DES GOBELETS ET DES EMBOUTS BUCCAUX PROPRES POUR ÉVITER LES INFECTIONS CROISÉES.

NE VERSEZ PAS D'EAU À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL OU DE LA CONNEXION ENTRE L'ADAPTATEUR SECTEUR ET L'HÔTE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION LOCALE. L'UNITÉ PRINCIPALE, LE GOBELET À MÉDICAMENTS ET LES ACCESSOIRES DU NÉBULISEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DANS DE L'EAU BOUILLANTE POUR LA DÉSINFECTION ET NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DANS UN FOUR À MICRO-ONDES POUR LE SÉCHAGE.

LE NÉBULISATEUR BÉBÉ BP 3190 EST DOTÉ D'UNE BATTERIE LIÛHIUM INTÉGRÉE, PAS BESOIN DE REMPLACER LE LA BATTERIE.

VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION À CET APPAREIL LORS DE LA CHARGE (NBM-4B UNIQUEMENT), NE SURCHARGEZ PAS.

CONTRE-INDICATIONS :

LES PATIENTS EN MANQUE GRAVE D'OXYGÈNE OU EN INSUFFISANCE RESPIRATOIRE SONT INTERDIT D'UTILISER CET APPAREIL.



babypharm

2.INSTRUCTIONS

6

2.1 Principe de fonctionnement

Ce produit est principalement composé de composants piézoélectriques. Les composants piézoélectriques convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique et génèrent des vibrations ultrasonores. L'onde de choc comprime le liquide dans le gobelet à médicament, de sorte que le médicament liquide passe à travers les micropores de la feuille d'atomisation pour pulvériser le médicament liquide. Il est pulvérisé sous forme de brouillard et utilisé par des inhalateurs.

2.2 Destiné à l'utilisation

Atomisez le médicament, pour le traitement.

Le produit est utilisé pour les patients conscients, s'applique à tous les enfants et adultes, peut être utilisé à l'hôpital et pour la famille.

2.3 Caractéristiques

Conception microporeuse, la taille des particules atomisées (MMAD) est de $2.3 \pm 25\%$ um, pour une absorption plus efficace.

Composants piézoélectriques, conception à faible bruit, volume mesuré ≈ 50 dB (A).

- Compact et léger, facile à transporter.
- Conception à un bouton, facile à utiliser.



babypharm

3. ILLUSTRATION

7

Composants indépendants, faciles à nettoyer, le gobelet à médicaments est lavable.

Vitesse de nébulisation rapide, taux de nébulisation $\cdot 0,2\text{ml}/\text{min}$.

Moins de résidus de médicaments, la quantité de résidus de $0,5\text{ ml}$, donc plus économique.

Méthodes d'alimentation multiples, adaptées à un usage domestique et idéales pour les voyages.

Le NÉBULISATEUR BÉBÉ BP 3190 est alimenté par une batterie au lithium rechargeable.


3. Illustration du produit

Ce produit se compose de l'unité principale, du gobelet à médicament (composant piézoélectrique), du masque, de l'embout buccal et de l'adaptateur secteur (en option).

Couvercle de la tasse

Tasse à médicament

Atomisation

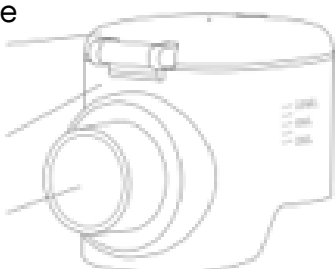

Boucle de la tasse

Orifice de branchement



Composant piézoélectrique



babyphar

4. MODE D'EMPLOI

8


Electrode

Bouton de démarrage

Indicateur de fonctionnement


Indicateur tasse médicament

Indicateur de charge

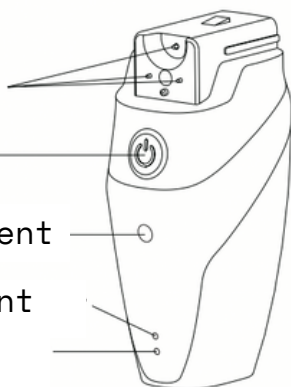

Main unit


Couvercle de batterie

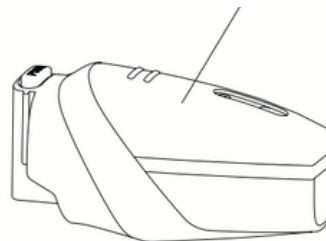


Couvercle de protection pour gobelet à médicaments



Embouchure

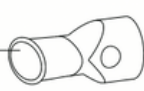

Masque

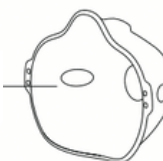


Assurez-vous que les composants du nébuliseur sont propres, hygiéniques et secs.

Avant utilisation.

4.1 Ajouter un médicament liquide

4.1.1 Poussez le gobelet à médicaments vers l'avant de l'unité principale après avoir appuyé sur le bouton du gobelet arrière de l'unité principale.

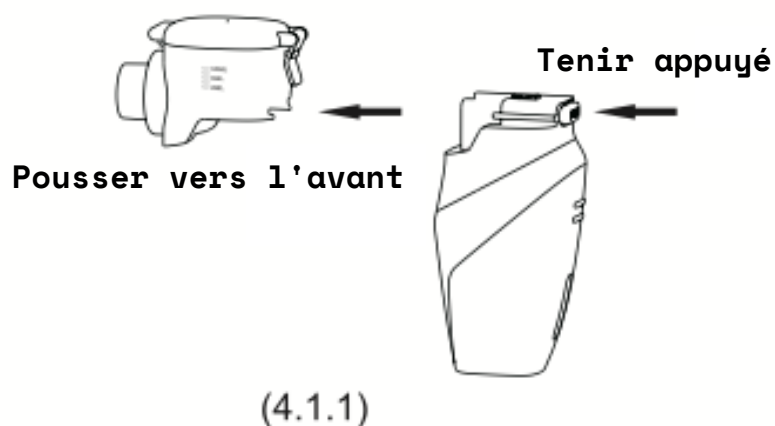

Tenir vers l'avant

4.1.2 Ouvrez le couvercle du gobelet à médicaments et versez le médicament dans le gobelet puis fermez




4. MODE D'EMPLOI

9

babypharm


- Ajoutez au moins 1 ml de médicament liquide et n'ajoutez pas de médicament au-delà de la ligne.
- Retirez le gobelet à médicaments de l'unité principale lors de l'ajout de médicaments.
- Fermez le couvercle du gobelet à médicaments pour éviter que le liquide ne s'écoule.
- Ne secouez pas violemment le nébuliseur lorsque le gobelet à médicament est rempli de médicament liquide.

4.1.3 Remettez la tasse dans l'unité principale jusqu'au clic.

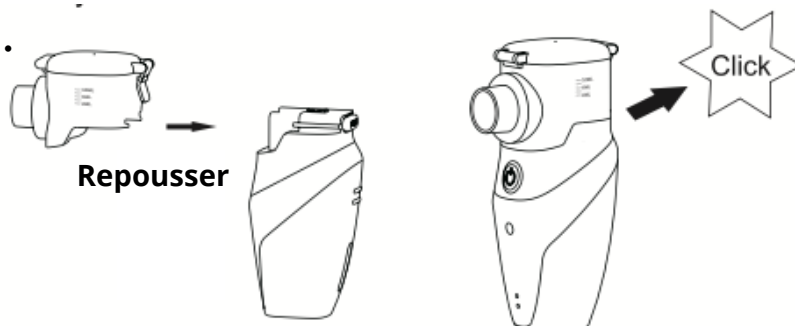

Veillez garder l'électrode sur l'unité principale et le gobelet à médicaments propres, et vérifiez que le gobelet à médicaments est bien en place.

4.2 Installer le masque ou l'embout buccal

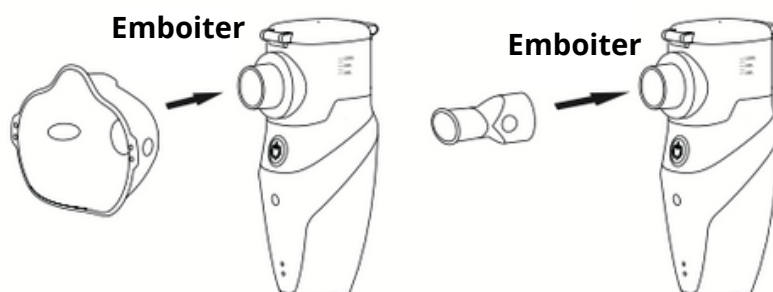

L'embout buccal, le masque pour adulte et le masque pour enfant fournis sont des pièces jetables. Veuillez utiliser l'inhalateur conformément aux instructions du médecin.



babypharm

4. MODE D'EMPLOI

10

Lorsque l'indicateur de basse tension (voyant jaune) clignote, la batterie est sur le point de s'épuiser.

4.3.3 Chargement de la batterie au lithium

Le modèle BP 3190 est doté d'une batterie au lithium intégrée. Il est recommandé de connecter l'alimentation pour activer la batterie lors de la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation. Ouvrez la fiche de protection de la prise USB Mirco à l'arrière de l'unité principale. Connectez le port USB dans le trou de la prise, puis branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur dans la prise électrique.

L'indicateur de travail (voyant vert) clignote pour annoncer la charge. La charge est terminée jusqu'à ce que l'indicateur de travail (voyant vert) ne clignote plus. Une fois la charge terminée, débranchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur et la fiche USB Mirco, puis fermez la fiche de protection de la prise Mirco.

N'utilisez pas le nébuliseur lors de la charge. Débranchez l'appareil de la prise électrique une fois la charge terminée, ne branchez pas l'alimentation pendant une longue période.



babypharm

4.4 Fonctionnement du nébuliseur

4.4.1 Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, avec l'indicateur de travail vert allumé.

4.4.2 Ajustement du taux de nébulisation

a) Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, l'appareil fonctionne à une vitesse plus rapide avec indicateur de travail vert vif.

b) Pendant le fonctionnement, si l'utilisateur appuie une deuxième fois sur le bouton d'alimentation, l'appareil fonctionne à un taux de nébulisation inférieur et l'indicateur de travail vert devient faible.

4.4.3 Mode de nettoyage automatique

Si l'utilisateur continue d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le nettoyage automatique est activé. Avec l'indicateur de travail vert clignotant, l'appareil fonctionne pendant 2 minutes puis s'éteint automatiquement. S'il n'y a pas de médicament ou s'il y a un liquide très peu conducteur (par exemple, de l'eau distillée) dans le gobelet, l'indicateur du gobelet (lumière bleue) clignotera, puis il s'éteindra automatiquement. Après la mise sous tension, le nébuliseur subira une courte période de démarrage (dans un délai d'environ 2 secondes) puis pulvérisera normalement. Pendant le processus de pulvérisation, il peut y avoir un bruit causé par des vibrations à haute fréquence. Veuillez secouer doucement le nébuliseur pour réduire le son. Tenez doucement le nébuliseur, détendez-vous et commencez à respirer.



babypharm

4. MODE D'EMPLOI

12

Les caractéristiques des médicaments étant différentes, lorsque le nébuliseur ne peut pas s'arrêter automatiquement après qu'une partie du médicament liquide est épuisée, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil immédiatement afin d'éviter de l'endommager.

Lorsque le liquide est sur le point d'être épuisé, il est recommandé d'incliner légèrement la face avant du nébuliseur (du côté de la direction de pulvérisation) vers le patient, ce qui est bon pour mettre le liquide restant en contact avec la pièce atomisée pour la nébulisation. Ne couvrez pas les parties du masque et de l'embout buccal avec vos mains ou d'autres objets pendant le processus d'atomisation.

Pendant l'utilisation de cet appareil, si une irrégularité ou une gêne est observée, veuillez cesser de l'utiliser et consulter immédiatement un médecin. Pendant le processus d'atomisation de certains liquides, une grande quantité de mousse sera concentrée à proximité du maillage dans le gobelet à médicament, ce qui peut facilement interrompre la pulvérisation. Dans ce cas, éteignez immédiatement le nébuliseur, secouez légèrement le nébuliseur, puis remettez-le en marche.

4.5 Mise hors tension

4.5.1 Arrêt automatique après 20 minutes de fonctionnement continu.

4.5.2 Quand le médicament est épuisé, le nébuliseur émet un son, l'indicateur de la tasse de médicament (lumière bleue) clignote et le nébuliseur s'éteint automatiquement.



babypharm

5 . NETTOYAGE

13

- a) Retirez le gobelet et le masque.
 - b) Rincez la tasse, le masque avec de l'eau propre.
 - c) Unité principale : nettoyez la surface de l'unité principale de l'appareil avec du tissu en coton fin humide et séchez-la avec un tissu en coton sec.
 - d) Nettoyez les électrodes et le gobelet et pulvériser normalement.
 - e) Essuyez les pièces nettoyées avec de la gaze propre et séchez soigneusement.
 - f} Mettez le couvercle de protection sur le gobelet à médicaments, installez-le sur l'appareil et rangez-le
- N'essuyez pas le nébuliseur avec des liquides corrosifs volatils tels que le benzène, l'essence ou un diluant.**

Avant de nettoyer les pièces, veuillez retirer la batterie. .

Pour éviter que de la poussière de papier ou de chiffon résiduel ne pénètre dans le godet et obstrue l'atomiseur, n'utilisez pas de papier ou de chiffon.

Ne nettoyez pas les composants du produit au lave-vaisselle et ne séchez pas les composants du produit au four à micro-ondes.



**Rincer à
l'eau claire**



5. NETTOYAGE 6. DÉPANNAGE

14

babypharm

Veillez désinfecter l'embout buccal et le masque après chaque utilisation. Si les pièces sont sérieusement polluées, veuillez remplacer le paAs à temps. Il est recommandé d'avoir les deux méthodes de désinfection suivantes :

a) Désinfection à l'alcool : désinfectez l'embout et le masque avec de l'alcool médical à 75 %.

b) Après la désinfection, rincer abondamment à l'eau claire pour éviter les résidus de désinfectant.

- Ne pas désinfecter avec un désinfectant sous-chloré, cela peut endommager les composants.

- ✳ Si vous utilisez un désinfectant et qu'il est entré en contact avec les yeux, rincez à l'eau claire dès que possible ou prenez rendez-vous dans un établissement médical à proximité.

5.3 Stockage

Après chaque utilisation et nettoyage et désinfection, vérifiez que le corps et la coupelle sont secs et rangez-les dans la boîte. Placez la boîte dans un endroit sec et frais et gardez-la hors de portée des enfants.

6. Dépannage

Problème	Causes du problème	Rectifier le problème
L'appareil ne s'allume pas	Batterie faible	Recharger l'appareil
S'allume mais ne marche pas	L'électrode sur l'unité principale est sale	Nettoyer correctement l'électrode et rallumer



6. DÉPANNAGE










15







babypharm S'allume mais ne marche pas	L'indicateur de basse tension (lumière jaune) clignote, batterie faible	Remplacez la batterie et redémarrez. Charger le lithium batterie et redémarrage après charge terminée.
	Le maillage est sale ou bloqué	Nettoyez le gobelet à médicaments conformément aux instructions. Remplacez le gobelet à médicament si le défaut n'est pas exclu après le nettoyage.
	Le gobelet à médicaments est mal assemblé	Assemblez le gobelet et redémarrez
	Le gobelet à médicaments est rempli de médicament liquide pendant une longue période pour former un film d'eau	Videz le gobelet à médicaments, et redémarrez.
Mise sous tension, l'indicateur qui clignote pendant 1 seconde, puis l'indicateur de gobelet à médicament clignote (lumière bleue)	Aucun médicament ou liquide n'est présent	Ajouter le médicament
	Liquide très peu conducteur liquide à l'intérieur du gobelet de médicament (comme de l'eau distillée)	Ajouter le médicament
	Le gobelet à médicaments n'est pas en place	Mettez le en place et redémarrez
	L'électrode de l'unité principale ou le gobelet est sale	L'électrode de l'unité principale ou le gobelet est sale
	Le liquide n'a pas été en contact avec la maille depuis plus de 8 secondes environ	Inclinez l'avant du nébuliseur vers l'utilisateur pour que le liquide entre en contact avec la maille.



Arrêt automatique pendant l'utilisation	Le liquide est épuisé	Ajoutez des médicaments.
	Le médicament liquide n'est pas en plein contact avec la maille	Inclinez l'avant du nébuliseur vers l'utilisateur pour que le liquide entre en contact avec la maille.
	Il y a un résidu liquide sur la maille et un liquide très faiblement conducteur (comme de l'eau distillée) est placé dans le gobelet à médicaments.	Ajoutez des médicaments.
Le liquide est épuisé , mais le nébuliseur ne peut pas s'arrêter	Les propriétés chimiques de certains médicaments liquides sont différentes et l'œnductivité est trop forte	Arrêtez manuellement l'appareil.
	Certains liquides peuvent produire de la mousse dans le gobelet à médicaments	Nettoyez la mousse et redémarrez.
Fuite de liquide	Trop de médicament dans le gobelet à médicament, dépassant le volume maximal	Versez l'excès de liquide et redémarrez.
	Pendant l'utilisation, le gobelet à médicaments tremble violemment	Tenez fermement le nébuliseur pendant l'utilisation.
	Le gobelet à médicament est endommagé ou l'anneau en silicone scellé a vieilli	Remplacer un nouveau gobelet à médicaments.

Si le nébuliseur ne fonctionne toujours pas correctement après avoir pris les mesures ci-dessus, nous vous recommandons de contacter le revendeur pour l'entretien.

	Lire les instructions avant utilisation
	type BF
	Information sur l'usine de fabrication
	Representation autorisée en Europe
IP22	IP code of the device: this device's grade of against ingress of solid foreign objects -- \cong 12.5mm diameter (and the against access to hazardous parts with finger); the grade of waterproof is dripping (15° tilted)
	Complies with the European Medical Device Directive (93/42/EEC and amended Directive 2007/47/EC. Notified Body is SGS
	Date de production
	Numéro de lot
	Suivre les instructions
	Disposition en accord avec la directive 2012/19EU (WEEE)

	En accord avec la directive RoHS 2011:65/EU du parlement européen et du conseil de l'Europe du 8 juin 2011
	Fragile, à manipuler avec précaution
	A conserver au sec
	Côté vers le haut
	Empilement
	A utiliser pour une seule personne



babypharm

18

8.SPÉCIFICATIONS

Type d'appareil	Nébulisateur portable
Modèle	BABYPHARM NÉBULISATEUR BP 3190
Source d'alimentation	Batterie Lithium
Adaptateur	Entrée : AC100-240V, 50/60HZ, 0.5A Sortie : d.c 5V/1A
Consommation	< 2W et <0.1 mA en veille
Taux de nébulisation	>0.2mL/min
Taille des particules	MMAD 2.3um 25%, 60% au dessus de 0.5-5um
Résidu	< 0.5ml
Bruit	<50db(A)
Oscillation de la maille	110 / 10KHZ
Durée de la batterie	plusieurs heures
Temps de charge	Environ 3 heures
Indication batterie faible	Jaune
Coupure automatique	Au bout de 20 minutes
Indicateur de niveau d'eau bas	Flash bleu
Volume de la coupelle de médicament	10 ml
Extinction automatique	20 minutes
Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement : 10 à 40 degrés Humidité : 10% - 95% RH (non condensée) Pression atmosphérique : 860 à 1060 hPa




babypharm

19

8.SPÉCIFICATIONS

Type de protection contre les chocs électriques	Alimentation interne type BF sur partie appliquée
Grade d'imperméabilité	IP22
Durée de vie du produit	1 an (hors consommables)
Dimensions	41 (L)*67(W)*125(H) mm
Poids	243 g

La courbe de distribution granulométrique en volume équivalent des particules atomisées est la suivante :

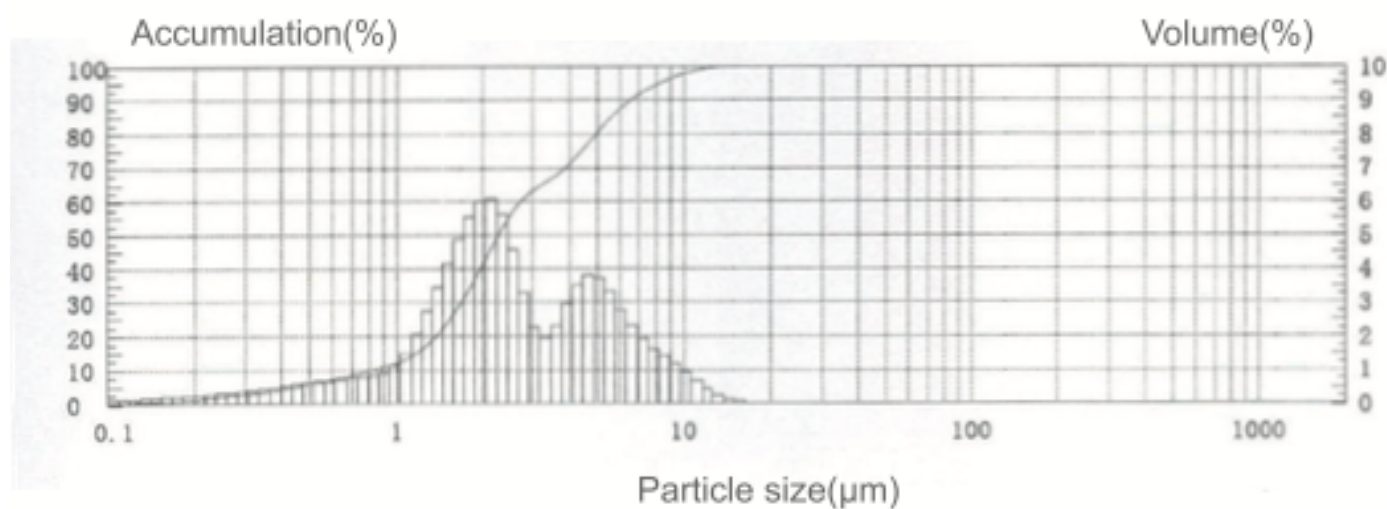

Conditions d'essai : température ambiante 25 ± °C, humidité relative 85 %, test à l'eau pure. (Les données de test peuvent varier en fonction des conditions de test et des changements dans le médicament liquide).

9. EMC information

Une déclaration des risques environnementaux a été effectuée.



Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air	±8kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV differential mode ±2kV common mode	±1kV differential mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cycle g) At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	0% UT; 0,5 cycle g) At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the device requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
NOTE UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emission

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of device should assure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The device suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – for all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
---------------	----------------------	------------------	--



babypharm

21

10. GARANTIE

1. Le fabricant et ses distributeurs agréés garantissent que les produits bénéficieront d'un service de garantie gratuit dans un délai d'un an à compter de la date d'achat.

2. Le service de garantie gratuit ne couvre pas les éléments suivants :

--Pièces vulnérables et consommables : gobelet à médicaments, masque adulte, masque enfant, embout buccal, batterie.

--Problème causé par un démontage, une réparation ou une modification non autorisés de ce produit

--Échec dû à un manque d'entretien raisonnable.

--Défaut causé par un défaut d'utilisation ou de stockage conforme au manuel d'utilisation.

--Défauts causés par des dommages au corps de l'équipement, aux composants électriques et mécaniques.

--L'étiquette du numéro de lot est modifiée, effacée ou utilisée.

INFORMATIONS DE CONTACT

BABYPHARM

www.babypharm.fr

hello@babypharm.fr

Service client : +33 297 462 798

FABRIQUÉ EN CHINE



babypharm



babypharm

22

10. GARANTIE

Pour une garantie optimale de votre produit, créez votre garantie en ligne sur www.babypharm.fr et vous n'aurez plus de risque de perdre cette garantie !

**Pour obtenir cette notice,
flashez ce QR code !**



NUMÉRO DE LOT

Nébulisateur BP 3190

BOBB111301



babypharm